



www.quantel-derma.com

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

68181007 PatiententInfo (D) Psoriasis & Vitiligo

werbarsbuerode - 11271 - 11/11 - Rev. 3

DIE EXCIMER-LICHTTHERAPIE VON SCHUPPENFLECHTE UND WEISSFLECKENKRANKHEIT





Viele Menschen sind von verschiedenen Formen der Schuppenflechte betroffen. Auch die häufig auftretende – im Prinzip ungefährliche – Weißfleckenkrankheit beeinflusst die Lebensqualität ebenso wie die Schuppenflechte.


Betroffene mussten sich bislang Salbentherapien unterziehen oder wurden – im Falle der Weißfleckenkrankheit – sogar mit ihrem Leiden zurückgewiesen. Die Excimer-Lichtbehandlung bietet in beiden Fällen einen wirklichen Lichtblick.

Was bewirkt die Excimer-Lichttherapie?

Bei der Schuppenflechte findet die Hauterneuerung um ein vielfaches schneller statt als bei der gesunden Haut. Dies führt zu einer starken Schuppenbildung. Die Ursachen hierfür sind teilweise noch ungeklärt. Als sicher gilt allerdings, dass diese Krankheit bei genetischer Vorbelastung häufiger auftritt. Auch verschiedene Faktoren wie z. B. Stress oder seelische Belastungen können die Symptome verstärken.

Bei der Schuppenflechte werden die betroffenen Hautstellen mit hochdosiertem Excimer-Licht behandelt, was im Normalfall für lange Zeit zu einem völligen Verschwinden der Symptome führt. Die Excimer-Lichtbehandlung wird heute sogar bei manchen Formen der Neurodermitis erfolgreich eingesetzt.

Bei der Weißfleckenkrankheit wird durch eine gezielte Excimer-Lichtbehandlung an den unpigmentierten Hautstellen eine Neubildung von Pigmentzellen angeregt. Dies bedeutet einen Rückgang der weißen Flecken.

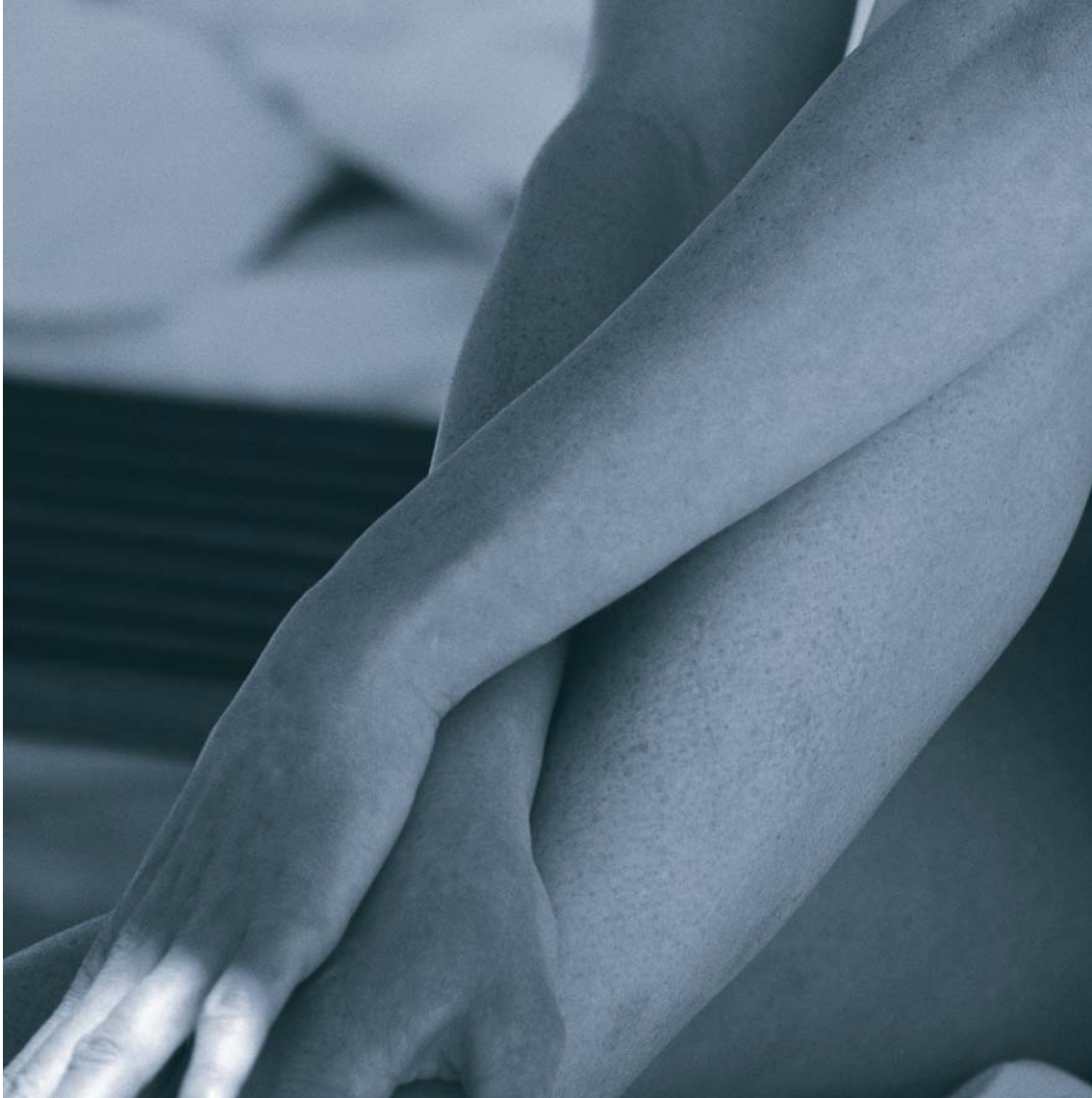



Was ist möglich?


Bei der Schuppenflechte gibt es viele verschiedene Formen. Die lokalisierte, d. h. abgegrenzte Schuppenflechte, die an bestimmten Körperstellen auftritt, ist für diese Therapie am besten geeignet. Durch einen gezielten Einsatz von Excimer-Licht auf den erkrankten Hautstellen wird die gesunde Haut geschont und der Therapieerfolg ist im Vergleich zu konventionellen Lichtduschen ungleich höher. Da nur die betroffenen Areale behandelt werden, kann hier das Excimer-Licht wesentlich höher dosiert werden, was zu einem schnelleren Therapieerfolg führt. Auch bei bisher schwierig zu behandelnden Fällen ist die Excimer-Lichtbehandlung oft erfolgreich. Das Gleiche gilt für die Weißfleckenkrankheit.

Ein weiterer Vorteil ist, dass vergleichsweise wenige Sitzungen erforderlich sind und die Gesamtbehandlungsdauer dadurch erheblich kürzer ist als bei der konventionellen Lichttherapie.

Vor und nach der Behandlung: Was müssen Sie beachten?

- Im Gegensatz zu vielen anderen Arten der Lichtbehandlung ist hier eine Vermeidung von Sonnenbestrahlung nicht erforderlich.
- Es kann einige Stunden nach der Excimer-Lichtbehandlung zu leichten Hautrötungen kommen, die in manchen Fällen mit einem Sonnenbrand vergleichbar sind. Entsprechende Pflege – beispielsweise mit kühlenden Cremes – ist sinnvoll.
- Im Einzelfall kann eine Blasenbildung auftreten, die nach ein paar Tagen abheilt.
- Sie können den Erfolg nach der Excimer-Lichttherapie durch geeignete Maßnahmen unterstützen. Vermeiden Sie z. B. Stress, achten Sie auf geeignete Körperpflege und ausgewogene Ernährung. Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholkonsum.





Quantel Derma Behandlungslösungen für ästhetische und dermatologische Indikationen werden eingesetzt zur:

- Hautverjüngung, allgemeinen Hautbildverbesserung
- Entfernung unerwünschter Körperbehaarung
- Entfernung von Besenreisern und anderen Gefäßveränderungen
- Entfernung flächiger Rötungen sowie kleiner roter Äderchen
- Entfernung von Tätowierungen und unerwünschten Pigmentierungen
- Entfernung von Sonnenflecken, Warzen und anderen gutartigen Hautveränderungen
- Therapie von Akne und Aknenarben
- Glättung von Falten und Narben
- Therapie von Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Weißfleckenkrankheit und Neurodermitis